

SOLUCIÓN INTEGRAL EN
TERAPIAS RESPIRATORIAS



kingon

Mantenimiento de las baterías

A todas las baterías que no se usen regularmente,
deben hacerse un mantenimiento cada **3 meses!**



Cargar la batería al
100%



Encender el Kingon y usar hasta
que llegue a

40%~60%

Si no usa el Kingon por un largo tiempo, por favor retire la batería del concentrador.



www.marksrl.com.ar

[mark.srl](https://www.instagram.com/mark.srl)

[MarkSRLonline](https://www.facebook.com/MarkSRLonline)

[Mark S.R.L.](https://www.linkedin.com/company/mark-s.r.l.)

Escaneá el código QR para conocer
todas las maneras de comunicarte con nosotros

